

Príklad súpravy na pripojenie dialýzy MA-991-ZEST-487.

1




Pred začatím procedúry si umyte ruky (lekár aj pacient).

2



Na vykonanie procedúry si pripravte dezinfekčný prostriedok, škrtidlo a vhodné kanyly.

3

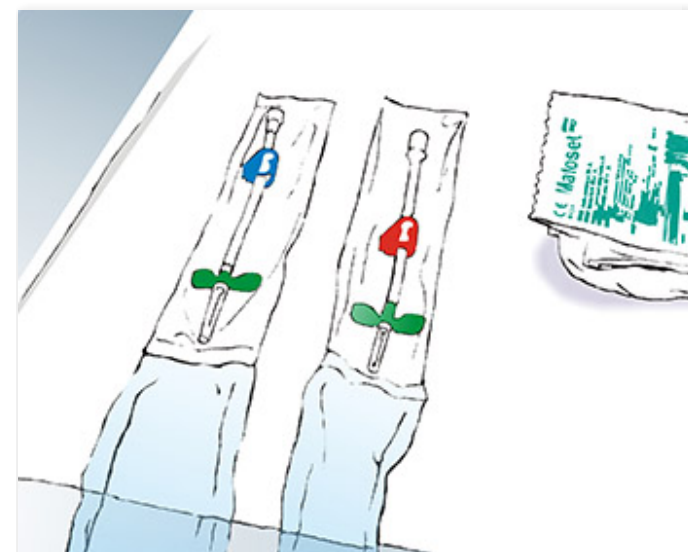


Vyberte sterilné rúško a umiestnite ho pod predlaktie pacienta.

4



5

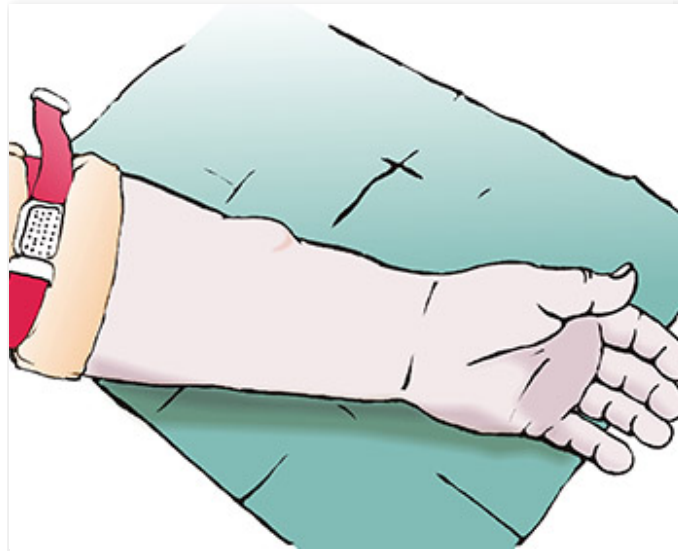

Potom si nasadíte jednu rukavicu na ľavú ruku a druhú nechajte na sterilnej časti otvoreného obalu.

6



7



Dezinfikujte pacientovo predlaktie pomocou pripravenej dezinfekčnej tekutiny a sterilných tampónov zo súpravy.

8




»

9



»

10

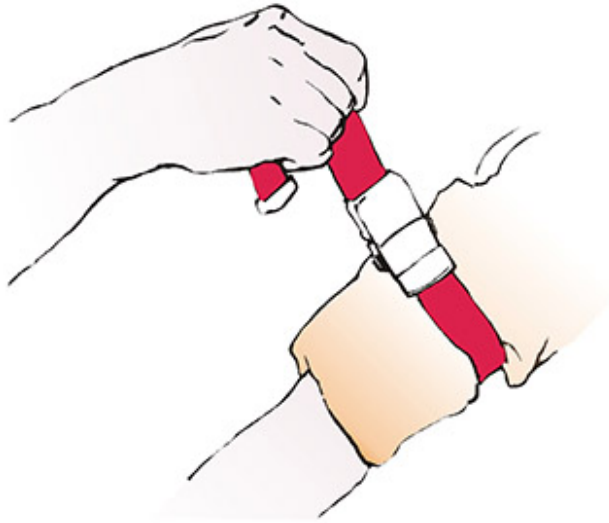


Utiahnite škrtidlo.

11




Nasadte si správnu rukavicu.

12

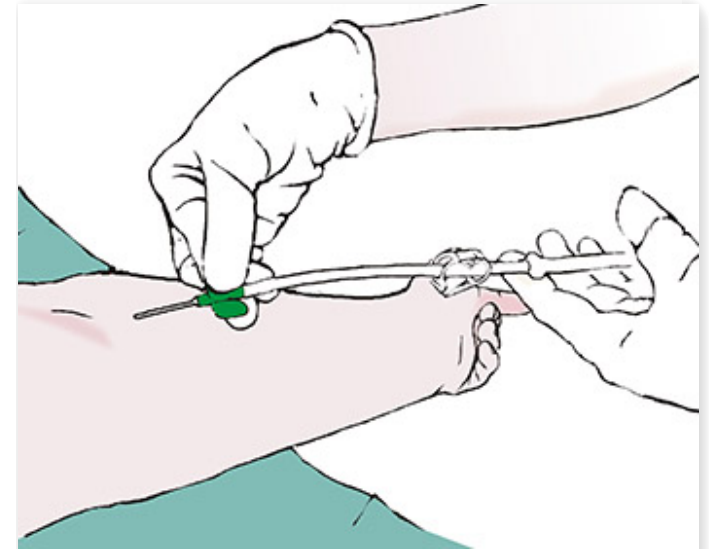


Umiestnite kanylu do žily.

13

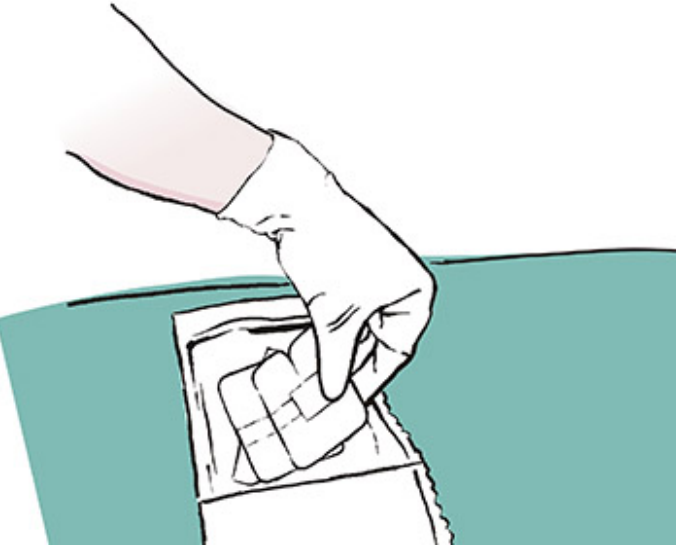


Po zavedení kanyly ju zafixujte špeciálnym obvazom na upevnenie kanyly (tiež v súprave).

14

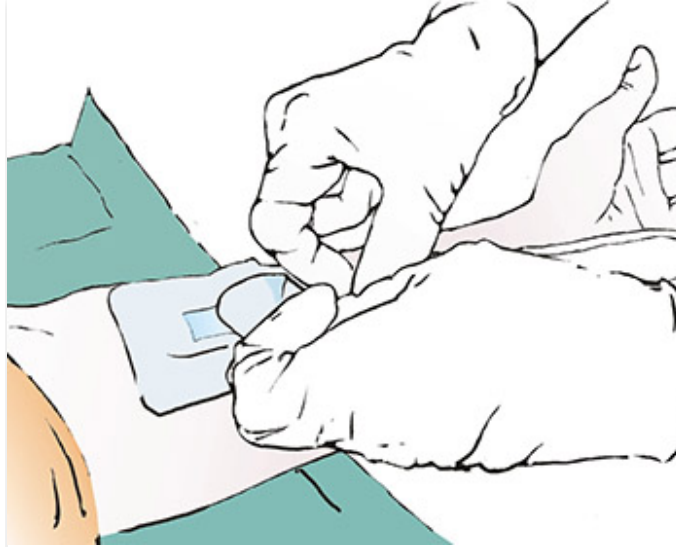


15

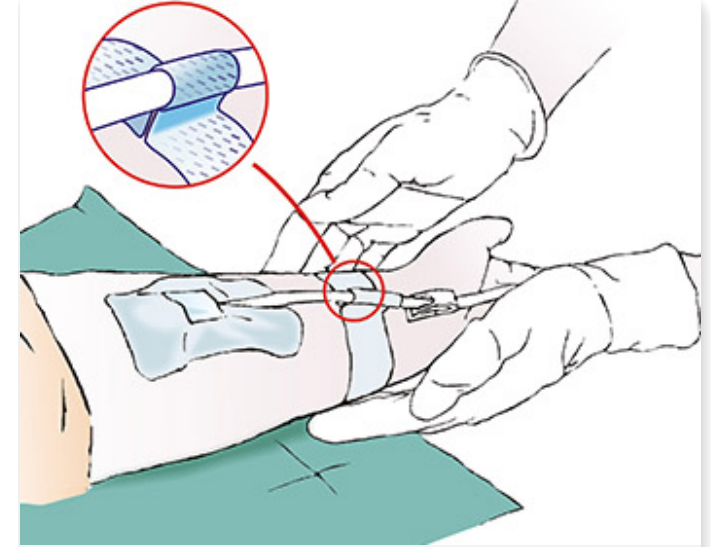

Na konci zaistíte drenáž kanyly netkanou lepiacou páskou.

16

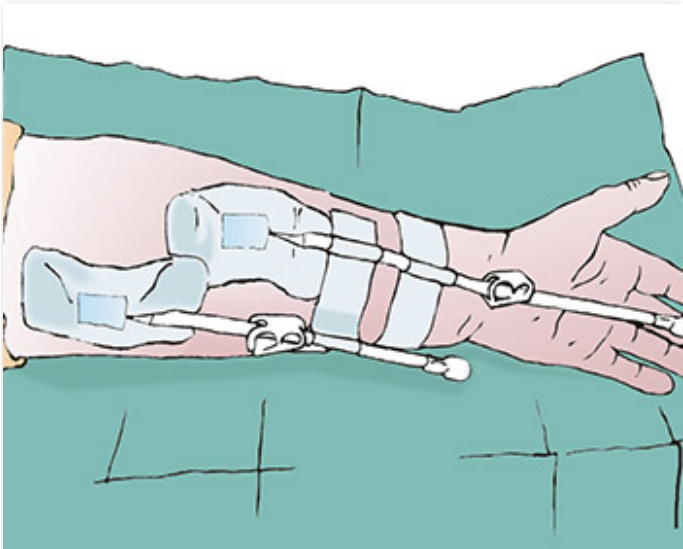

Teraz je pacient pripojený. Dialýza trvá 3-4 hodiny.