

Príklad súpravy na odpojenie dialýzy MA-991-ZEST-488.

1



Pred ukončením procedúry si umyte ruky (lekár).

2



Otvorte súpravu na odpojenie dialýzy.

3



Nasadte pacientovi na ruku jednu rukavicu.


# Matoset dialyzačná spojovacia súprava - spôsob odpojenia.

4




Potom si špecialista nasadí obe rukavice.

5

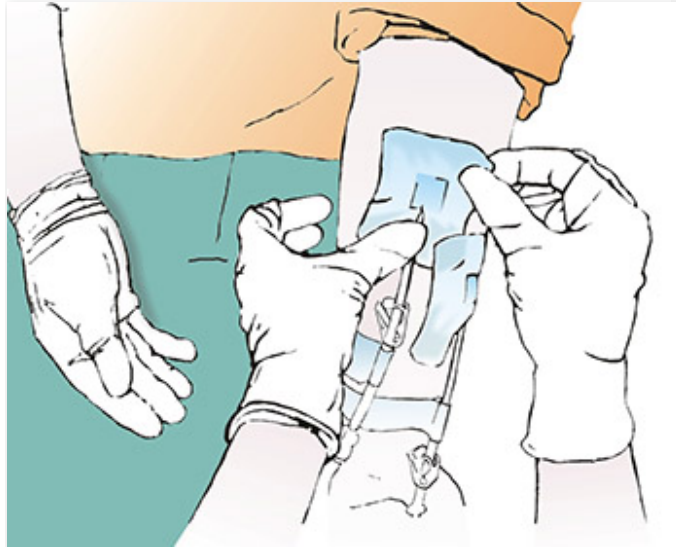


Postupne vyberte kanyly, pričom pomocou pacienta zaistíte miesta vpichu tampónmi.

6

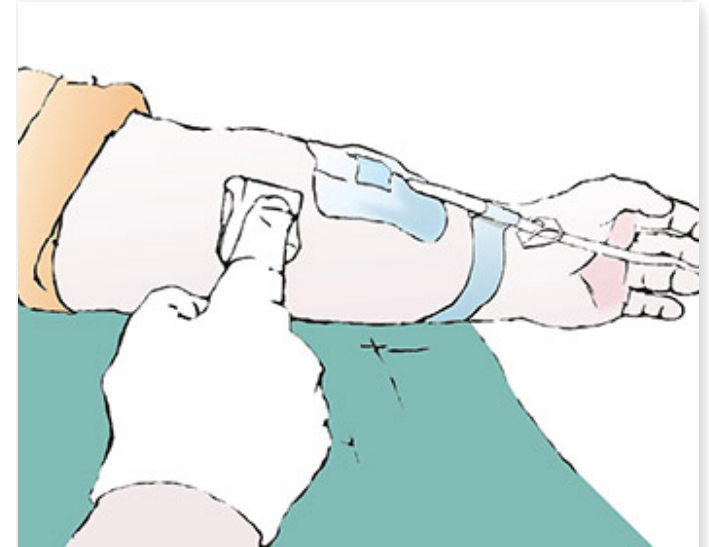

»

7

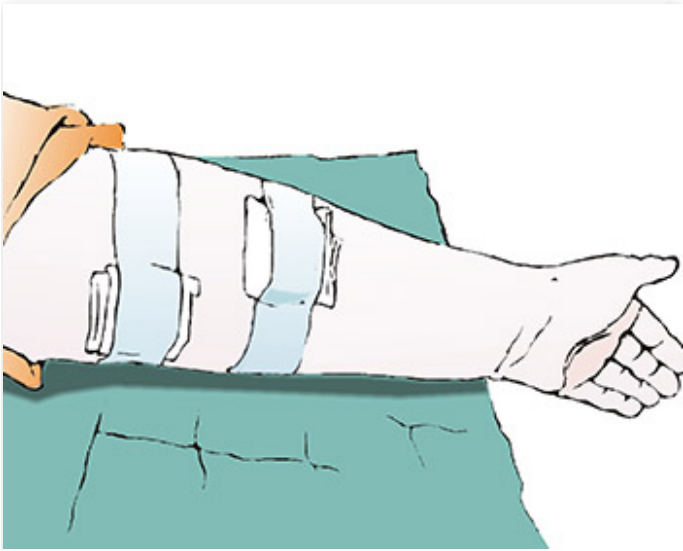

Po odstránení oboch kanýl musia byť miesta vpichu chránené obväzmi zloženými z netkaných tampónov a lepiacich pásov.