


1

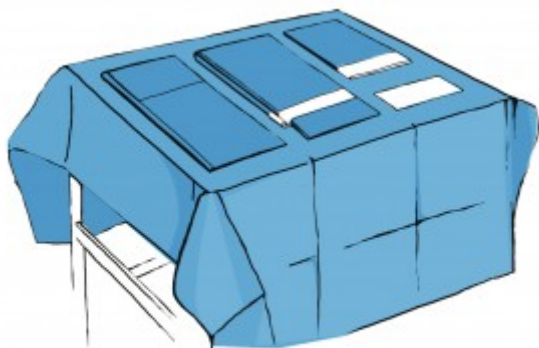

Po otvorení obalu položíme rúšku na pomocný stôl. Vonkajším rúškom prikryjeme stôl. Rozložíme obsah súpravy na stole.

2



Položíme väčšiu podložku Seni Soft pod bedrá pacientky.

3



Použijeme rúško zo súpravy na obalenie nôh pacientky kvôli zaisteniu sterility operačného pola.

4



Po pôrode utrieme novorodenca priloženým rúškom z mäkkej bielej netkanej textílie.

5



Zabalíme novorodenca do menšej podložky Seni Soft a nasadíme mu na hlavu čiapočku.