



1

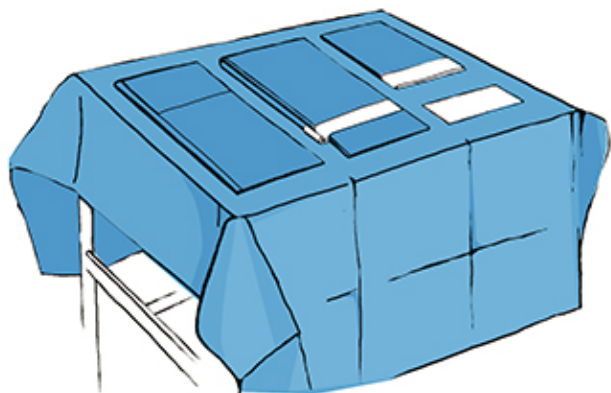

Po otvorení obalu položíme rúšku s obsahom na pomocný stôl. Vonkajšou rúškou prikryjeme stôl. Rozložíme obsah súpravy na stole, venujeme pozornosť piktogramom na rúškach označujúcich miesto ich použitia.

2

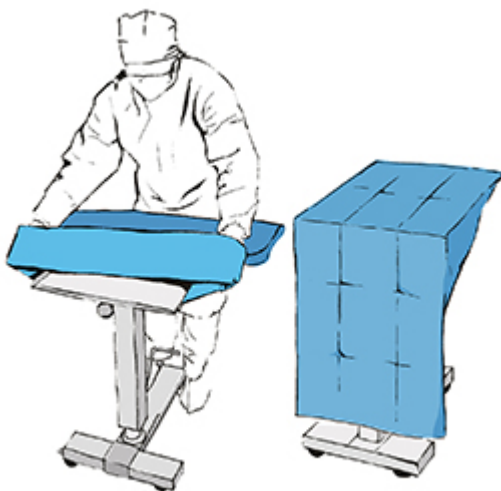

Natiahneme návlek na stôl na nástroje.


3



Nasadíme návlek na nohu pacienta a upevníme ju pod kolenom samolepiacimi páskami.

Rozloženie súpravy na artroskopiю kolenného kĺbu Matodrape

4

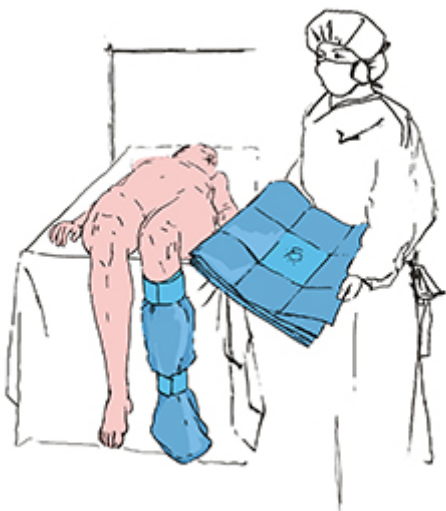


Rozložíme rúšku zloženú napoly. Rúška je zložená tak, že je otvor s pružnou manžetou hneď viditeľný.

5



Rozložíme rúšku smerom nahor po tele pacienta a pretiahneme nohu v návleku otvorom s pružnou manžetou. Upevníme spodný otvor tesne pod kolenom tak, aby sa koleno nachádzalo medzi otvormi.

6

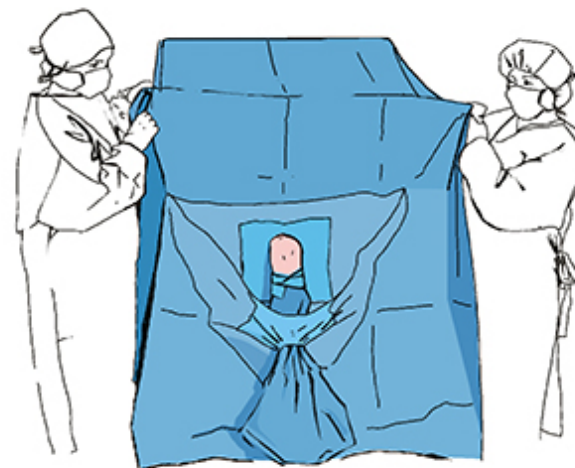

Rozložíme zostávajúcu časť rúška a prikryjeme tak celého pacienta. Zo strany hlavy upevníme rúško na anestéziologický monitor pomocou lepiacich pásov nachádzajúcich sa v rohoch rúška.