



1

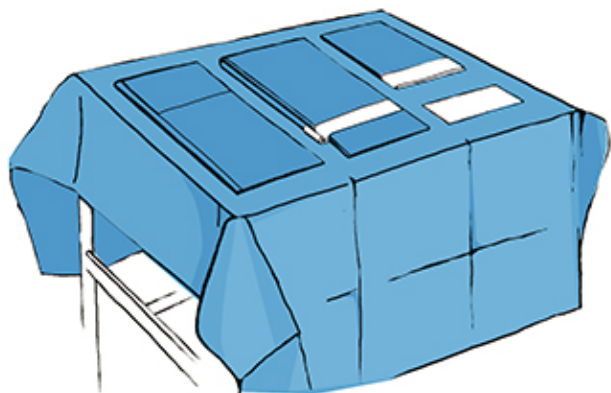

Po otvorení obalu položíme rúšku s obsahom na pomocný stôl. Vonkajšou rúškou prikryjeme stôl. Rozložíme obsah súpravy na stole, venujeme pozornosť piktogramom na rúškach označujúcich miesto ich použitia.

2

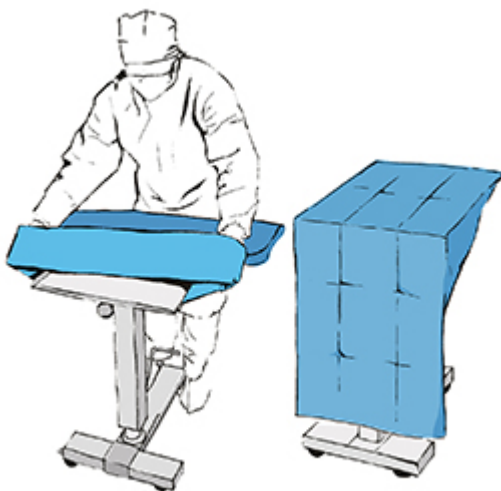


Natiahneme návlek na stôl na nástroje.

3




Odlepíme ochrannú pásku z rúška označeného piktogramom chodidla.

4

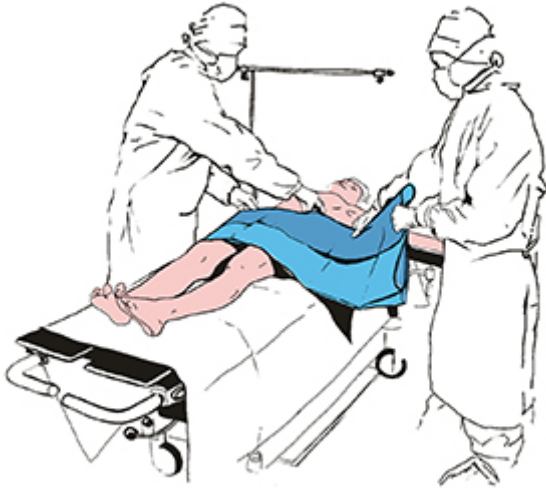


Upevníme rúšku na telo pacienta a roztiahneme ju v smere šípok, čím vymedzíme spodnú hranicu operačného poľa. Zvyšnú časť rúška roztiahneme na nohy.

5

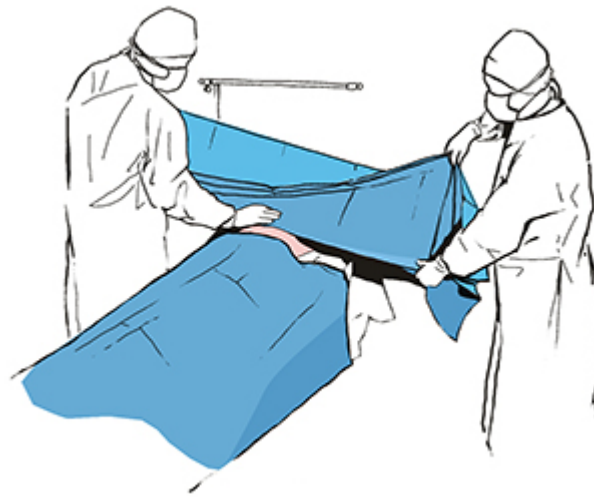

Zaistíme hornú hranicu operačného poľa prilepením rúška zo strany hlavy pacienta (rúško označené piktogramom hlavy). Následne roztiahneme rúško vo smere šípok a upevníme ho k anestéziologickému monitoru pomocou lepiacich pásov v rohoch rúška.

6

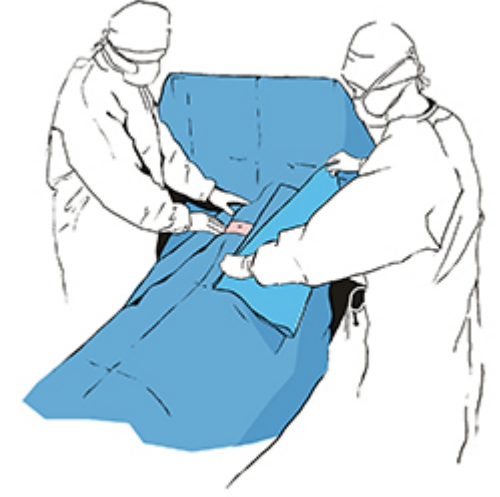

Upevníme bočné rúška, čím vymedzíme hranice operačného poľa.